



www.ablenetinc.com

1 Вставьте аккумулятор и включите

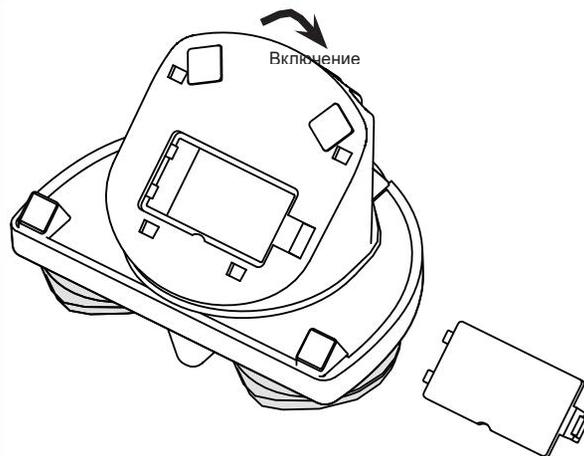


Подключите одну 9-вольтовую батарею в нижней части устройства. Поверните ручку регулировки громкости, чтобы включить устройство.

2 Войдите в режим записи

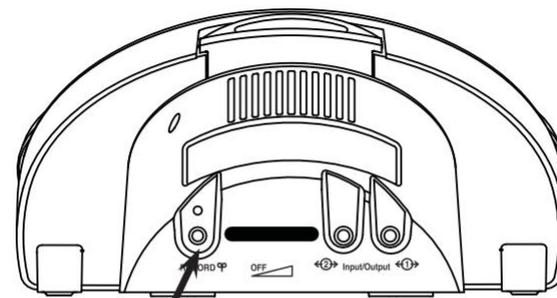

Нажмите и удерживайте, затем отпустите
Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ, пока не загорится индикатор ЗАПИСЬ, затем отпустите.

3 Запись

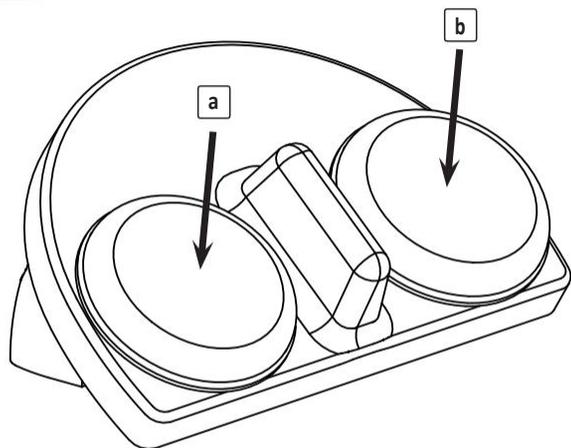


a. Нажмите и удерживайте переключатель вверх, начните говорить, когда услышите звуковой сигнал. Отпустите, когда закончите.

b. Повторите то же для второго положения.

Индикатор ЗАПИСЬ будет мигать во время записи.

4 Выход из режима

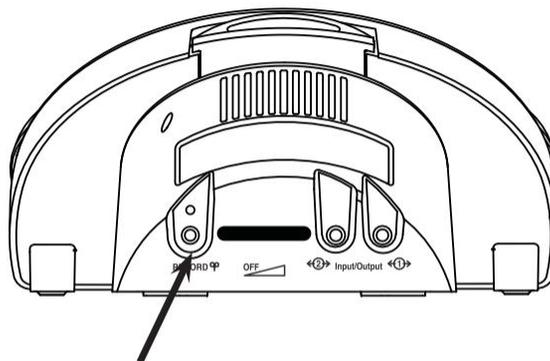


Нажмите и

Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы выйти из режима записи.


ПРИМЕЧАНИЕ: iTalk2 имеет 2 минуты общего времени записи, а iTalk2 с уровнями - 4 минуты. Индикатор станет желтым и начнет мигать, когда останется только десять секунд.

5 Воспроизвести сообщения

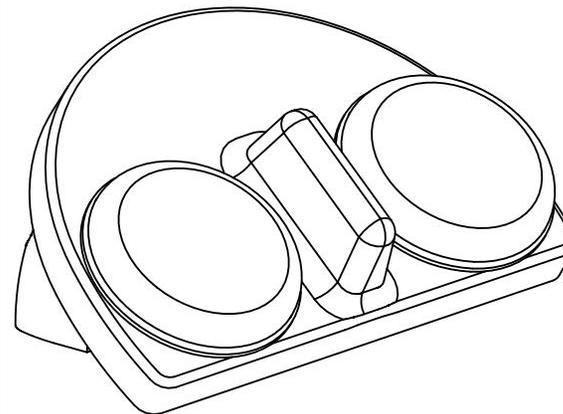

iTalk2 теперь запрограммирован и готов к использованию.

Дополнительные функции

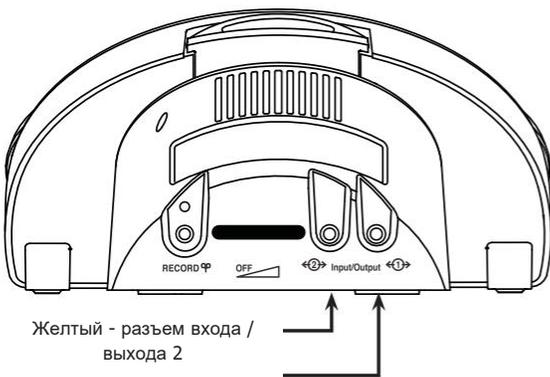

Желтый - разъем входа /
выхода 2

Управление игрушками или приборами

Разъемы ввода/вывода iTalk2 позволяют вам активировать, адаптированные к переключателю, игрушки или приборы с помощью этого устройства.

1. Подключите любую адаптированную к переключателю игрушку или прибор к одному или обоим гнездам ввода/вывода.
2. Запишите сообщение в соответствующем месте(ах).

ПРИМЕЧАНИЕ: Красный выключатель активирует разъем

ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления электрическим прибором требуется PowerLink®. Для получения информации об адаптации игрушек и приборов, посетите www.ablenetinc.com


Воспроизведение сообщения с помощью внешнего переключателя

Разъемы входа/выхода iTalk2 по умолчанию соответствуют вышеуказанным настройкам. Чтобы использовать внешний переключатель(и) с iTalk2:

1. Выключите устройство.

Функция игрушки/прибора отключена при использовании внешнего переключателя(ей). Чтобы вернуться к стандартной функции игрушки/устройства, выключите и снова включите устройство.


Использование картинок и символов

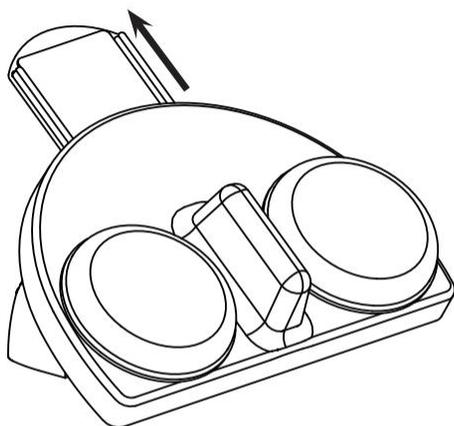

В комплект iTalk2 включены две заглушки для переключателей. Используйте эти прозрачные колпачки из пластика для закрепления изображений или символов на верху переключателей.

iTalk2 также включает в себя встроенный держатель для символов в верхней части устройства. Вытяните прозрачный пластиковый держатель из устройства для хранения любой картинки или символа размером 2 на 2 дюйма.

Использование уровней


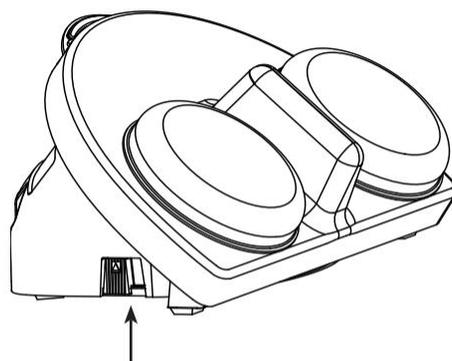


Переключатель
уровней (iTalk2 только с
уровнями)

iTalk2 с уровнями обеспечивает три уровня записи для повышения гибкости.

Используйте тумблер на боковой панели iTalk2, чтобы выбрать соответствующий уровень. Вы можете записывать отдельные сообщения для каждого местоположения сообщения на каждом уровне.

Карта продукта и гарантия

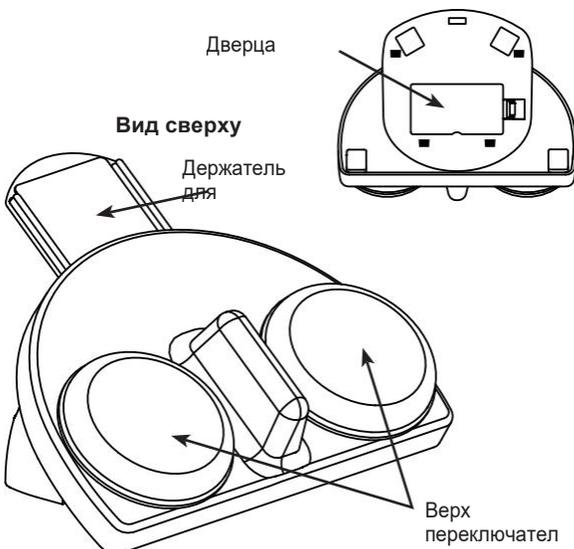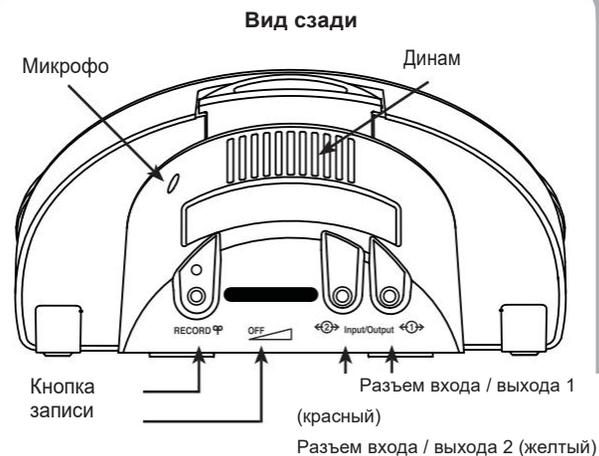

Информация о гарантии / ремонте / возврате

AbleNet предлагает ограниченную гарантию на один год для iTalk2 и iTalk2 с переключателями уровней. Для получения полной информации о гарантии посетите www.ablenetinc.com

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах AbleNet:

AbleNet, Inc., Миннеаполис/Сент-Пол, Миннесота
800-322-0956 (США и Канада)
Интернет: www.ablenetinc.com

© 2011 AbleNet, Inc., Все права защищены.