



Краткое руководство
QuickTalker™ 7
QuickTalker™ 12
QuickTalker™ 23

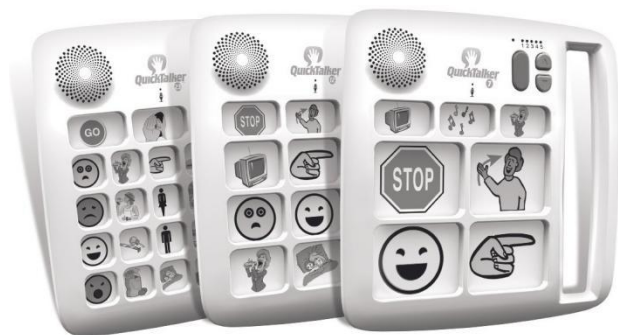

www.ablenetinc.com

Ключевая особенность

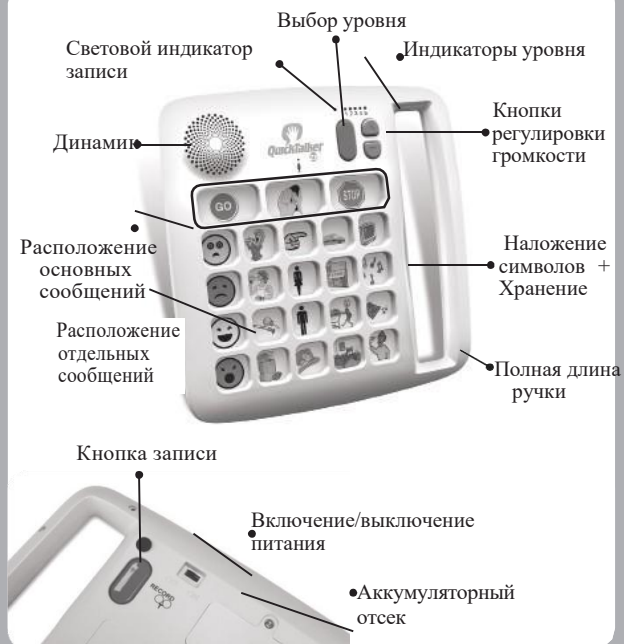

Шаг 1 - Включение QuickTalker™

Включение QuickTalker™


Переверните устройство на обратную сторону. Вставьте 4 батарейки АА в устройство, как это указано. Используйте выключатель питания для включения устройства.



Шаг 2 - Выберите уровень

Выберите уровень


Выберите УРОВЕНЬ (1-5), нажав красную кнопку на передней панели устройства.

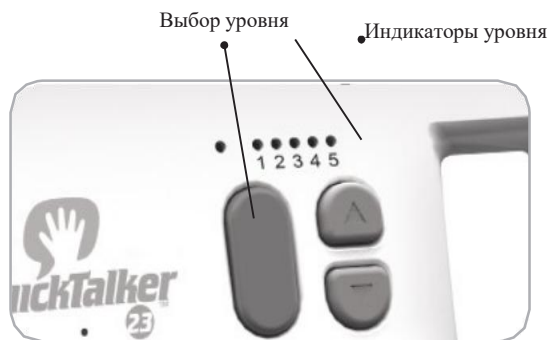

Шаг 3 - Запись сообщений

а) Вход в режим записи

Нажмите и удерживайте кнопку «ЗАПИСЬ» на задней панели устройства, пока не загорится красный индикатор, затем отпустите.

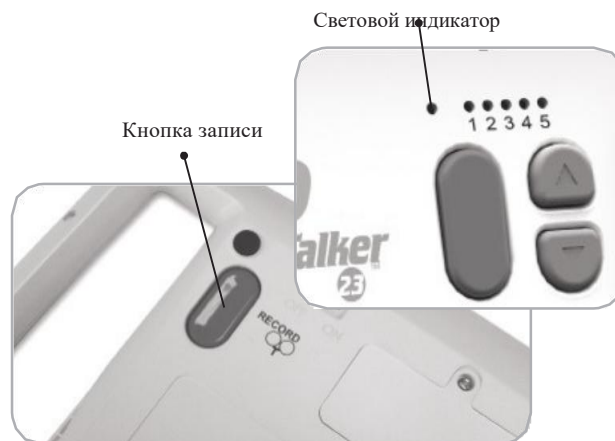

б) Запись сообщений

Нажмите и удерживайте нужное место сообщения, начните говорить после звукового сигнала, затем отпустите. Повторите для других местоположений. Совет! Говорите на расстоянии 6-8 дюймов от микрофона для громкого, чистого звука.



в) Выход из режима записи

Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ. Включаются световые индикаторы. Примечание: Устройство автоматически выйдет из режима записи через 20 секунд бездействия.

Шаг 4 - Воспроизведение сообщения

Воспроизведение сообщения


Нажмите на нужное место, чтобы воспроизвести сообщение.



Примечание: Нажатие в другом месте остановит текущее сообщение.

Регулировка громкости

Нажимайте серые кнопки со стрелками, чтобы отрегулировать громкость.

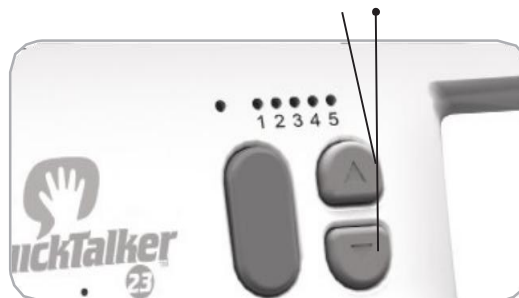

Функция сообщения и подсветки

При нажатии на местоположение индикатор записи будет мигать желтым, если это место пустое; красным, если там имеется запись.

Стирание сообщений

Одиночное местоположение - Войдите в режим записи, затем быстро нажмите и отпустите местоположение.

Уровень - Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ в течение 10 секунд, и все сообщения на текущем уровне будут удалены. Основные сообщения останутся.

Мастер очистки - Нажмите и удерживайте кнопку записи в течении

30 секунд и все сообщения QuickTalker будут удалены.

Кнопка записи



Дополнительные функции

Основные сообщения

Три основных сообщения будут одинаковыми для всех уровней. Последние записанные сообщения будут воспроизведены.

Блокировка управления (ЗАПИСЬ и УРОВЕНЬ)

Нажмите и удерживайте красные кнопки ЗАПИСЬ и УРОВЕНЬ одновременно в течение 5 секунд. Все индикаторы будут мигать дважды. Повторите, чтобы разблокировать элементы управления.

Кнопка записи

Индикаторы уровня



Гарантия и уход

Чистка и уход

Для очистки протрите слегка влажной тканью.

Гарантия

На продукцию AbleNet предоставляется двухлетняя ограниченная гарантия. Данная гарантия распространяется на дефекты материалов и изготовления в течение двух лет с даты покупки. Гарантия в полном тексте доступна на www.ablenetinc.com.

Дополнительная информация

Вы можете найти информацию о гарантии, гарантийном сроке и возврате/ремонте на сайте.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах AbleNet или для связи:

AbleNet, Inc.

Миннеаполис/Сент-Пол,
Миннесота 55113 800-322-
0956

www.ablenetinc.com