



Краткое руководство пользователя
Прогрессивный коммуникатор SuperTalker™ FT

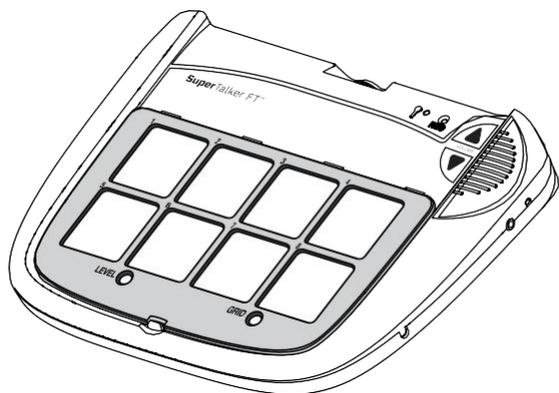

AbleNet[®]
www.ablenetinc.com


1 Включение SuperTalker

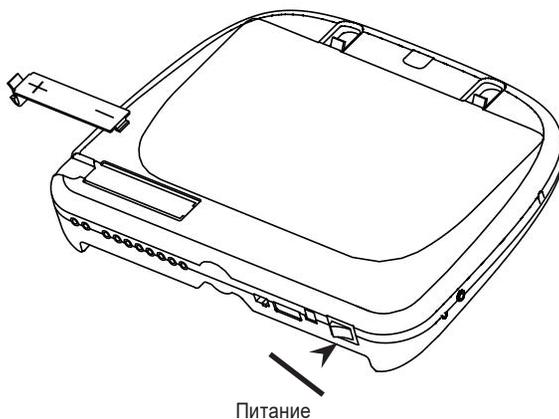

Питание

Вставьте 4 батарейки AA в устройство, как это показано. Кнопка включения/выключения питания находится на торце устройства.

2 Выберите Уровень и Сетку

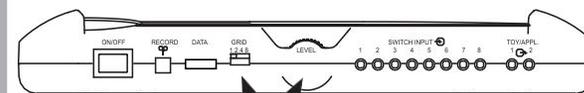


Отрегулируйте по мере необходимости

Для желаемых наложения и набора клавиш на клавиатуре: Выберите УРОВЕНЬ (1-8) и СЕТКУ (1, 2, 4, 8), используя элементы управления на торце устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что номер сетки совпадает с набором клавиш для клавиатуры и наложением, установленными в данный момент на устройстве.

Для получения информации о наложениях, наборах клавиш для клавиатуры и полезных советах см. обратную сторону.

3 Войдите в режим записи

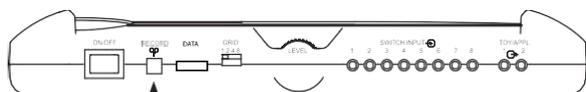


Нажмите и удерживайте, затем

Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ, пока не загорится индикатор ЗАПИСЬ,

4 Запись сообщений

Нажмите и удерживайте во время

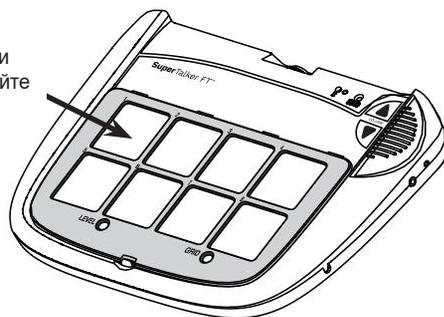


Нажмите и удерживайте нужное местоположение для сообщения и начните говорить, когда услышите звуковой сигнал. Отпустите, когда закончите.

Повторите для дополнительных сообщений.

Индикатор ЗАПИСЬ будет мигать во время записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Говорите близко к микрофону для громкого, чистого звука.

5 Выход из режима записи

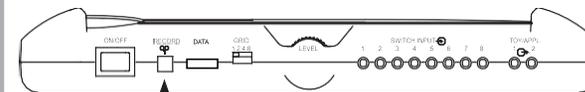


Нажмите и отпустите


Нажмите и отпустите кнопку ЗАПИСЬ, чтобы выйти из режима записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это устройство имеет 16 минут общего времени записи. Индикатор ЗАПИСЬ станет желтым, когда останется всего две минуты.

Дополнительные функции

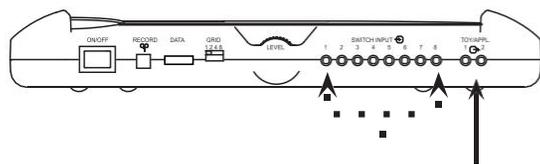

Разъемы для вводных переключателей
Разъемы для игрушек/приборов

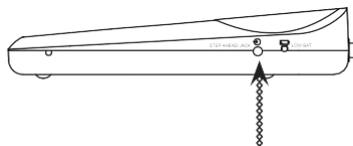

Передний разъем

Воспроизведение сообщения с помощью внешнего переключателя

Подсоедините выбранный вами переключатель к 1/8 дюймовому (3,5 мм) разъему вводного переключателя и продолжайте использовать устройство, как и раньше. (Разъемы обозначены с помощью *****)

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы вводных переключателей сопоставляются с местоположениями сообщений от 1 до 8 слева направо, в зависимости от используемой сетки.

Управление игрушками или приборами

Подключите любую адаптированную к переключателю игрушку или прибор к разъему для игрушек/приборов. Когда SuperTalker активирован, подключенная игрушка или прибор активируется на всю длину записанного сообщения.

(Разъемы обозначены с помощью *****)

ПРИМЕЧАНИЕ: Разъемы для игрушек/приборов сопоставлены с первыми двумя местоположениями сообщений на SuperTalker. Для управления электрическим прибором требуется PowerLink®4.

Использование переднего разъема

Подключите выбранный вами переключатель к переднему разъему, чтобы получить доступ к сообщениям, в порядке с местоположения от 1 до 8. (Разъемы обозначены с помощью *****)

ПРИМЕЧАНИЕ: Передний разъем будет перемещаться по местоположениям сообщений в зависимости от выбранной сетки.

Наборы клавиш для клавиатуры и наложения



О наборах клавиш для клавиатуры

SuperTalker включает в себя наборы клавиш в сетках 1, 2, 4 и 8. Снимите установленный набор клавиш для клавиатуры, нажав на вкладку в нижней центральной части набора клавиш. Маленькие цифры в верхней части каждого местоположения сообщения соответствуют гнездам внешнего переключателя (см. Выше).

Хранение наборов клавиш для клавиатуры

В хранилище наборов клавиш на задней панели SuperTalker может храниться до трех наборов одновременно. Здесь также могут храниться обычные бумажные наложения.

Полезные советы

Советы по записи

Если в режиме записи SuperTalker не будет активирован через 20 секунд, устройство выйдет из режима записи.

Мастер очистки - Нажмите и удерживайте кнопку ЗАПИСЬ в течение 10 секунд, чтобы удалить все сообщения из SuperTalker.

Советы по воспроизведению

Если используемый набор клавиш не соответствует выбранной сетке, SuperTalker не будет воспроизводить правильное сообщение.




Если вы нажмете на местоположение сообщения, в котором не было записано ни одного сообщения, индикатор ЗАПИСЬ будет мигать желтым цветом.

Регуляторы громкости

Блокировка или разблокировка регуляторов громкости SuperTalker путем одновременного нажатия левой и правой части в местоположении сообщения. При регулировке громкости, если

Индикатор ЗАПИСИ желтый - громкость разблокирована. Индикатор ЗАПИСИ красный - Звук заблокирован или макс/мин

Карта продукта и гарантия

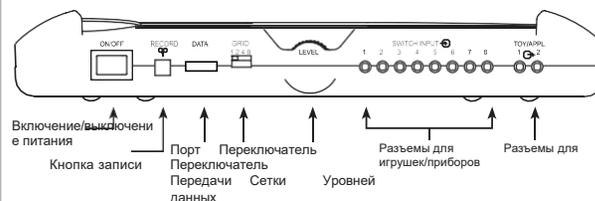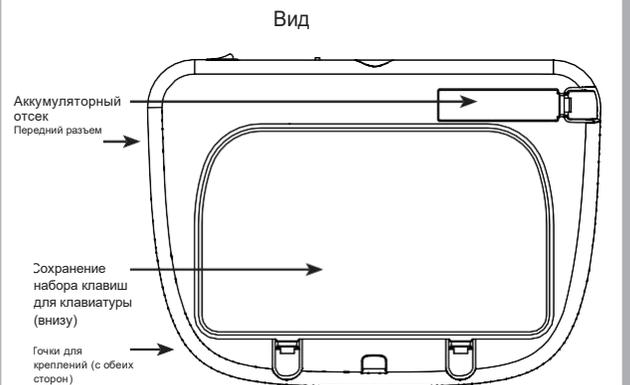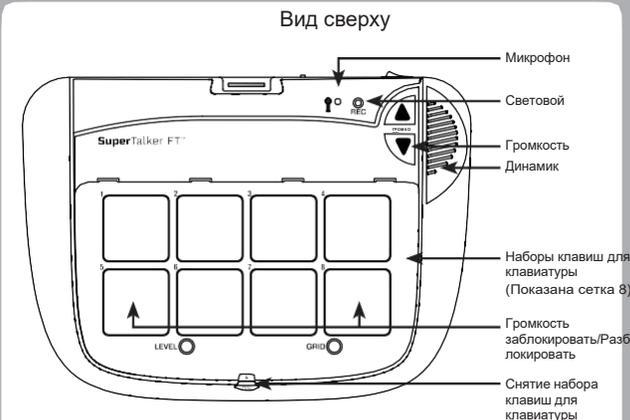

Информация о гарантии / ремонте / возврате

AbleNet предлагает ограниченную двухлетнюю гарантию на прогрессивный коммуникатор SuperTalker. Для получения полной информации о гарантии посетите www.ablenetinc.com

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах AbleNet свяжитесь с нами:

AbleNet, Inc.
2625 Паттон